

Standardisation de l'équipement anthropométrique

- S'assurer que l'ensemble de l'équipement anthropométrique fonctionne correctement et qu'aucun outil n'est endommagé. Si un outil est endommagé et qu'il doit être remplacé, enregistrez les détails dans la colonne "Remarques sur les conditions de l'équipement".
- Avant le test de standardisation anthropométrique, étiqueter chaque outil avec un nombre distinct :
 - Balances de 1 à n
 - Toises de 1 à n
 - Rubans PB de 1 à n




Vérifier la qualité des rubans mesureurs au niveau des toises. Un ruban de mauvaise qualité empêchera la lecture précise des mesures de taille/ longueur !

- Standardiser la balance avec un poids standard (min. 5 kg) deux fois de suite.



Il est recommandé d'utiliser une planche en bois pour stabiliser la balance au sol.

- Standardiser la toise avec un bâton en bois de 110,0 cm et le ruban PB avec un tuyau en plastique.

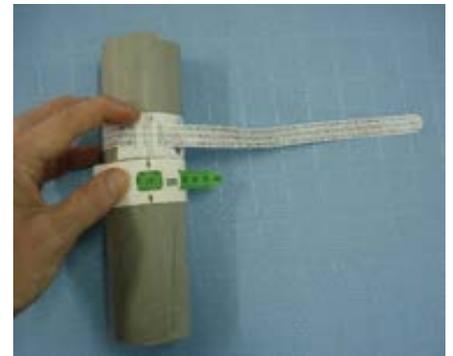

- Les superviseurs doivent toujours prévoir des outils de rechange en cas de problèmes.
- Si un des outils ne fonctionne pas correctement pendant la collecte des données, appeler le superviseur et demander à échanger immédiatement l'outil.